




容器番号	容器	備考
01	汎用容器（分離剤入り）	
	容量	6mL・8.5mL
	添加剤	
	保管方法	常
	有効期間	1年
主な検査項目		


04	グルコース・HbA1c 用容器	
	採取量	2mL
	添加剤	NaF EDTA-2Na
	保管方法	常
	有効期間	1.5年
主な検査項目		
グルコース、ヘモグロビン A1c		

13	血液学容器	
	採取量	2mL・3mL・4mL
	添加剤	EDTA-2K
	保管方法	常
	有効期間	1.5年
主な検査項目		
末梢血液一般検査、血液像、血液型、直接クームス試験、その他		

16	尿中 C-ペプチド用容器	
	採取量	10mL
	添加剤	※全尿保存の場合は必ず専用保存剤を添加して下さい
	保管方法	常
	有効期間	1年
主な検査項目		
尿中 C-ペプチド		

02	汎用容器	
	容量	4mL・10mL
	添加剤	
	保管方法	常
	有効期間	3年
主な検査項目		
血清、血漿提出用		

07	シクロスポリン・タクロリムス用容器	
	採取量	5mL
	添加剤	EDTA-2Na
	保管方法	常
	有効期間	2年
主な検査項目		
シクロスポリン、タクロリムス		

14	内分泌学用容器	
	容量	5.5mL
	添加剤	EDTA-2Na
	保管方法	常
	有効期間	1.5年
主な検査項目		
レニン、アンジオテンシン、サイクリック AMP、その他		

25	尿一般容器	
	容量	10mL
	添加剤	
	保管方法	常
	有効期間	3年
主な検査項目		
尿一般検査		

03	汎用容器（分離剤なし）	
	容量	9mL
	添加剤	
	保管方法	常
	有効期間	1.5年
主な検査項目		
LE 細胞等		

08	アプロチニン容器	
	採取量	2mL
	添加剤	EDTA-2Na アプロチニン
	保管方法	常
	有効期間	1年
主な検査項目		
hANP		

15	血液凝固検査用容器	
	採取量	1.8mL
	添加剤	3.2% クエン酸 Na 0.2mL
	保管方法	常
	有効期間	1年
主な検査項目		
凝固因子活性、PT、APTT、FIB、AT Ⅲ、血中 FDP、その他		

27	滅菌スピッツ管	
	容量	10mL
	添加剤	
	保管方法	常
	有効期間	3年
主な検査項目		
尿細菌検査		


■ 容器取扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のものです。

検査でご利用になる容器のうち、特に添加剤の含むものについては、その取扱・保管には十分なお注意をお願い致します。


- ・小児や患者の手の届かない所に保管して下さい。
- ・使用の際、手足や、皮膚、特に眼にかからないように注意して下さい。
- ・誤飲しないように取扱・保管には注意して下さい。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をして下さい。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗って下さい。

容器番号	容器	備考
31	便中ヘモグロビン採便管	
	採取量	約 0.5g
	添加剤	
	保管方法	常
	有効期間	1.5 年
主な検査項目 便中ヘモグロビン《ラテックス》		

62	ウイルス遺伝子検査用容器	
	採取量	5mL
	添加剤	
	保管方法	常
	有効期間	1 年
主な検査項目 HBV - DNA 定量《TaqManPCR 法》, HBV pre - C, HIV - 抗原・抗体		

	採取量	
	添加剤	
	保管方法	
	有効期間	
主な検査項目		

	採取量	
	添加剤	
	保管方法	
	有効期間	
主な検査項目		

容器番号	容器	備考
32	呼気採取バッグ	
	採取量	各 250mL
	添加剤	
	保管方法	常
	有効期間	
主な検査項目 尿素呼気試験		

	採取量	
	添加剤	
	保管方法	
	有効期間	
主な検査項目		

	採取量	
	添加剤	
	保管方法	
	有効期間	
主な検査項目		

	採取量	
	添加剤	
	保管方法	
	有効期間	
主な検査項目		

容器番号	容器	備考
51	血中エンドトキシン・β-D-グルカン用容器	
	採取量	3mL
	添加剤	ヘパリン Na
	保管方法	常
	有効期間	2 年
主な検査項目 エンドトキシン, (1 → 3) - β - D - グルカン		

	採取量	
	添加剤	
	保管方法	
	有効期間	
主な検査項目		

	採取量	
	添加剤	
	保管方法	
	有効期間	
主な検査項目		

	採取量	
	添加剤	
	保管方法	
	有効期間	
主な検査項目		

■ 容器取扱い・保管上のご注意

有効期間は包装開封前のものです。

検査でご使用になる容器のうち、特に添加剤の含むものについては、その取扱・保管には十分なお注意をお願い致します。

- ・小児や患者の手の届かない所に保管して下さい。
- ・使用の際、手足や、皮膚、特に眼にかからないように注意して下さい。
- ・誤飲しないように取扱・保管には注意して下さい。
- ・眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けて下さい。
- ・誤って飲み込んだ場合、直ちに医師へ連絡をして下さい。
- ・皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗って下さい。